

Instrukce pro uživatele

Testu fekální okultní krve

Eli-Pack Fecal Occult Blood test

Vážený kliente,

od Vašeho lékaře jste obdržel zkumavku pro odběr stolice. Tato zkumavka je součástí Testu fekální okultní krve Eli-Pack, který je určen pro odhalení případného krvácení do trávicího ústrojí. Váš lékař používá nejmodernější způsob detekce krve ve stolici – jedná se o imunologický test vyráběný naší společností. Tento test dokáže zachytit pouhých **90 nanogramů lidského hemoglobinu** v jednom mililitru extrakčního pufru, čímž se stává jedním z nejpřesnějších testů svého druhu na českém trhu.

Je třeba dodržovat dietu?

Při testování testem Eli-Pack není třeba dodržovat dietu. Je tedy možno konzumovat jakékoliv potraviny včetně masa, zeleniny atd. Dva dny před testováním nežívejte větší množství acylpyrinu a jiných nesteroidních protizánětlivých léků a vyhněte se konzumaci většího množství alkoholu.

Kdy test neprovádět?

V případě menstruace je možné, že bude krev zanesena i do stolice a výsledek testu by pak byl pozitivní. Krvácející hemeroidy také způsobí pozitivitu testu. Krvácení při zácpě a krev v moči také můžou způsobit pozitivitu testu.

POSTUP ODBĚRU VZORKU

Vzorek stolice může být odebrán z toaletního papíru nebo čisté nádoby. Stolica nesmí přijít do kontaktu s vodou v toaletní míse.



KROK 1

KROK 5. Z lahvičky odšroubujte víčko s odběrovou tyčinkou, na jejímž konci je vnější závit.

KROK 6. Vsuňte závit, tj. konec odběrové tyčinky do vzorku stolice – náhodně na minimálně pěti různých místech.

KROK 2



špatné
množství vzorku

KROK 3
správné
množství vzorku



KROK 4



KROK 5

KROK 3. Otřete přebytečnou stolici ze závitů odběrové tyčinky toaletním papírem. Pro testování plně stačí stolice ulpělá v závitě. Nesnažte se nabírat stolici a přidávat ji do odběrové zkumavky!

KROK 4. Vložte víčko s odběrovou tyčinkou zpět do odběrové zkumavky a pevně utáhněte.

KROK 5. Zkumavku silně protřepejte, aby se vzorek promísil s extrakčním puřem.

KROK 6. Zkumavku uchovávejte při pokojové teplotě a zanešte lékaři co nejdříve, nejpozději do jednoho týdne od odebrání vzorku stolice.

Další služby a produkty naší společnosti najdete na webových stránkách:

- www.testboreliozy.cz
- www.mocoveinfekce.cz
- www.testceliakie.cz
- www.krevvestolici.cz
- www.elisabeth.cz



ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. | náměstí Svobody 87/18 | BRNO 602 00